




**Rollstuhlzubehör**

Unser Ideen helfen im Alltag

*und mehr...*

# Gebrauchsanweisung

## **GELKISSEN - TOI**

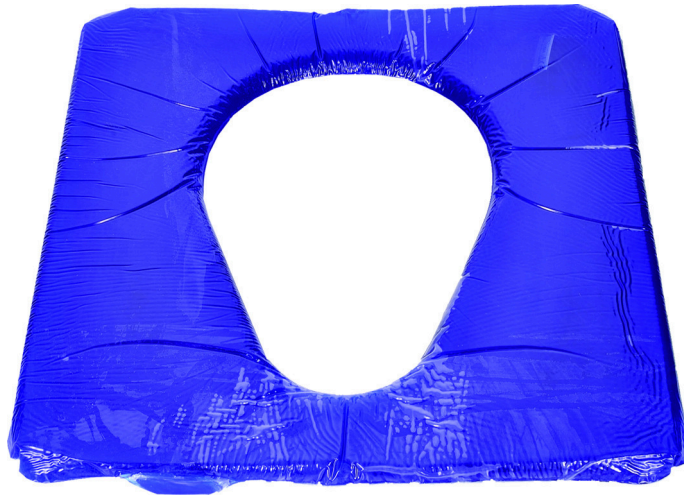



# Gebrauchsanweisung

## **1. Allgemeine Produktinformationen**

Bezeichnung:	GELKISSEN - TOI
Artikelnummer:	300500
Passend für:	Handelsübliche Toiletten und Toilettenstühle
Maximales Gewicht des Anwenders:	80 kg

## **2. Zweckbestimmung:**

Das GELKISSEN - TOI enthält ein hochwertiges PU-Gel. Handelsübliche Toiletten und Toilettenstühle sind oftmals mit einem Toilettensitz mit glatter, harter Oberfläche ausgestattet. Ein längeres Sitzen kann deshalb unangenehm sein. Das GELKISSEN - TOI ermöglicht durch sein Design ein besonders komfortables Sitzen.

## **3. Sicherheitshinweise:**

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich und befolgen Sie alle Hinweise. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Überprüfen Sie das Gelkissen vor der Benutzung auf Beschädigungen. Ein beschädigtes Gelkissen darf nicht mehr eingesetzt werden. Vermeiden Sie den Einsatz von spitzen Gegenständen, da diese die Gelaußenhülle beschädigen können.
- Das Kissen darf nicht geknickt oder verdreht werden. Der Anwender darf nicht auf das Gelkissen gezogen oder auf dem Kissen sitzend zurückgezogen werden, denn dadurch besteht Walkgefahr und eine Beulenbildung ist möglich. Die entstehende „Wurstbildung“ führt langfristig zur vollständigen Zerstörung des Kissens.
- Wenn der Anwender nicht über ausreichend Körperkräfte verfügt, um sich selbständig sicher zu halten, sollten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, die verhindern, dass er von dem Sitz rutscht. Denkbar wären z.B. Haltegurte oder die Anwesenheit einer helfenden Person. Im Zweifel halten Sie Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder dem Pflegepersonal.
- Bitte wenden Sie das Kissen täglich, um eine gleichmäßige Belastung zu gewährleisten und die Funktion des Kissens lange zu erhalten.
- Benutzen Sie das Kissen aus hygienischen Gründen nur bei einer Person und reinigen Sie es regelmäßig.
- Halten Sie das Gelkissen von Zündquellen wie Kerzen und brennenden Zigaretten fern.
- Bei Lagerungstemperaturen unterhalb der Raumtemperatur lassen Sie das Kissen bitte vor Benutzung etwas vorwärmen, damit es beim Anwender nicht zu Missempfindungen aufgrund der Kälte kommt.

## **4. Hinweise zur Nutzung:**

1. Legen Sie das Gelkissen entsprechend der Öffnung des Toilettensitzes auf die Sitzfläche.
2. Der Anwender setzt sich nun selbständig auf das Gelkissen oder wird durch Pflegepersonal auf das Gelkissen in der richtigen Position gesetzt.

## **5. Reinigung, Pflege und Lagerung:**

Die Reinigung des Gelkissens kann mit kaltem oder handwarmem Wasser erfolgen. Verwenden Sie dafür ein weiches Tuch. Setzen Sie zur Reinigung keinerlei aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel, keine Scheuerschwämme oder Bürsten, kein heißes oder kochendes Wasser, keine Dampfreiniger und keine konzentrierten Säuren und Laugen ein. Das Gelkissen sollte nur kurzzeitig mit alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln behandelt werden, da diese zur Zerstörung der Gelkissenhülle beitragen können. Ein längeres Eintauchen des Gelkissens in alkoholhaltige Flüssigkeiten ist nicht zu empfehlen, ein Abwischen ist dagegen unbedenklich. Beachten Sie bei der Wahl eines geeigneten Desinfektionsmittels auch die Angaben des jeweiligen Herstellers. Das Gelkissen ist nicht maschinenwaschbar und nicht schleuder- oder trocknergeeignet. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, das Kissen nur bei einem Anwender einzusetzen und raten vom Wiedereinsatz ab.

Bewahren Sie das Gelkissen flach und ohne Knicke in geschlossenen Räumen ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Die Lagerungstemperatur sollte zwischen 0 °C und 30 °C betragen.

## **6. Technische Daten:**

Gewicht:	3,26 kg
Größe:	40 x 40 x 2,5 cm
Größe Ausschnitt:	28 x 18 cm
Material:	Polyurethan-Gel in einer Polyurethanfolie, Farbe blau

## **7. Entsorgung:**

Die Entsorgung über den Restmüll ist erlaubt. Das Eindringen des Gels in die Kanalisation, Wasserläufe oder in den Erdboden sollte verhindert werden.

Die Gewährleistung für dieses Produkt auf Material- und Verarbeitungsfehler beträgt in Verbindung mit dem Kauf-/Lieferbeleg 12 Monate.

**Schäden durch unsachgemäße Behandlung sind hiervon ausgenommen.** Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden GELKISSEN - TOI und muss daher aufbewahrt werden. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.